

## Gebruikershandleiding **CleanWND®** doek

### **CLEANWND® doek voor reiniging /debridement van complexe wonden.**

Product Code 2015A; Per zakje: 1 doek, per box 10 zakjes.

#### **Gebruik van het doek:**

Open de verpakking zoals aangegeven en neem het doek uit de verpakking. Gebruik het doek om de wond te reinigen en debridement uit te voeren.

Het **CLEANWND®** doek heeft qua gebruik geen boven- of onderkant.

Gebruik één **CLEANWND®** doek per wond om te reinigen/debridement uit te voeren.

Met het **CLEANWND®** doek meerdere malen stevige, roterende bewegingen maken in de wond. Dit herhalen totdat het debris in de wond verwijderd is en een goed rood doorbloed wondbed zichtbaar is.

U kunt het **CLEANWND®** doek in twee delen knippen, een deel voor het debridement van de wond en het andere deel voor de reiniging van de omliggende huid. De **CLEANWND®** doek behandelt ook zeer effectief de keratose van de omliggende huid.

Het **CLEANWND®** doek is al vochtig en er zijn dus geen andere vloeistoffen nodig om de wond te reinigen/debridement uit te voeren.

Gooi het doek na gebruik weg als klinisch afval.

#### **Reiniging/debridement van:**

Complexe Wonden zoals diabetische voet ulcera, veneuze been ulcera en decubituswonden. **CLEANWND®** kan gebruikt worden als primair verband. Het product is niet bedoeld voor gebruik bij grote wonden.

#### **Actieve bestanddelen:**

Sodium hyaluronate, Phospholipid, Aloe Vera

#### **Waarschuwing:**

Gebruik het doek niet als de verpakking al open is. Gebruik bij baby's van 0-6 maanden en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven alleen onder supervisie van een arts.

Patiënten die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van het **CLEANWND®** doek moeten het niet gebruiken. In het geval van een allergische reactie, stop onmiddellijk met het gebruik van het doek en consulteer uw arts.